

Dein Start mit Kaleido und DBLG1 Einstellungen

Hallo! Bevor du beginnst, benötigen wir zu deiner Sicherheit einige wichtige Informationen.
Das Einstellungs Formular ist ein unentbehrlicher Schritt bei der Vorbereitung auf dein Training.
Dies muss von einer Diabetologin/in unterschrieben werden. Dann kann deine Trainingsreise mit Kaleido und DBLG1 beginnen.

Vor und Nachname : _____
Geburtstag
(DD-MMM-YYYY): _____
Insulinart: _____



Durchschnittliche Mahlzeit (Menge der Kohlenhydrate)	Anzugebender Wert*	Min - Max	Einheit
Durchschnittliche Größe des Frühstück		0 - 300	gramm
Durchschnittliche Größe des Mittagessens		0 - 300	gramm
Durchschnittliche Größe des Abendessens		0 - 300	gramm

**Nach der Initialisierung können die kleinen, mittleren und großen Portionsgrößen für Frühstück, Mittag und Abendessen eingestellt werden. Es können keine Dezimalzahlen verwendet werden. Bitte nur ganze Zahlen eingeben. Eine Änderung der durchschnittlichen Portionsgröße setzt den Algorithmus zurück.*



	Anzugebender Wert*	Min - Max	Einheit
Tages-Gesamt-Insulindosis		8 - 90	Einheiten
Körpergewicht		35 - 150	KG

**Nur ganze Zahlen eingeben; Dezimalzahlen sind beim DBLG1 nicht möglich*



	Anzugebender Wert*	Min - Max	Einheit
Letzter gemessener Hba1c Wert		4,1 - 15,6	%
Datum des letzten Hba1c Werts			

Dein Start mit Kaleido und DBLG1 Einstellungen

Basales Sicherheitsprofil über 24 Stunden

Start/ Endzeit	Rate Einheit/ Stunde	Start/ Endzeit	Rate Einheit/ Stunde
00:00 - 01:00		12:00 - 13:00	
01:00 - 02:00		13:00 - 14:00	
02:00 - 03:00		14:00 - 15:00	
03:00 - 04:00		15:00 - 16:00	
04:00 - 05:00		16:00 - 17:00	
05:00 - 06:00		17:00 - 18:00	
06:00 - 07:00		18:00 - 19:00	
07:00 - 08:00		19:00 - 20:00	
08:00 - 09:00		20:00 - 21:00	
09:00 - 10:00		21:00 - 22:00	
10:00 - 11:00		22:00 - 23:00	
11:00 - 12:00		23:00 - 24:00	
Gesamte Tägliche Basalrate			

Einstellungen

Kategorie	Einstellung	Wert	Standartwert Min - Max	Einheit
Zielwert Vorgaben ¹	Glukose-Zielwert		6.1 - [5.6 - 7.2]	mmol/L
	Schwellenwert für Unterzuckerungen		3.9 - [3.3 - 4.7]	mmol/L
	Schwellenwert für Überzuckerungen ¹		10 - [9.4 - 12.2]	mmol/L

Deine Notizen kannst
du dir hier eintragen

- ☐ Sobald die Schulung erfolgt ist, kann der Nutzer anschließend mit der Anwendung von Kaleido mit DBLG1 beginnen.

Name
Praxis / Klinik: _____

Diabetologe/in: _____


Datum: _____

Praxis / Klinik Stempel:

Unterschrift:

¹Die Änderung des Schwellenwertes für die Hyperglykämie ändert nur den visuellen Aspekt. Der Bildschirm färbt sich orange wenn der Blutzucker den neuen eingegebenen Schwellenwert überschreitet. Der vom Algorithmus verwendete Hyperglykämie Schwellenwert bleibt immer bei 10 mmol/L

Diabeloop® YourLoops und DBLG1 sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Diabeloop SA in Europa und/oder in anderen Ländern. Kaleido®, und ViCentra® sind eingetragene Marke von ViCentra B.V. Andere Marken und Markennamen sind Eigentümer ihrer jeweiligen Eigentümer. respective owners.

 Manufacturer: ViCentra B.V. Address: Rijnzathe 6, 3454 PV Utrecht, The Netherlands
Telephone: +31 (0) 88 3232 871 Email: hello@hellokaleido.com