


The logo for Kaleido. features the word "Kaleido." in a white, sans-serif font. The text is positioned on the right side of the image, set against a background of diagonal stripes in teal, orange, green, and yellow, which transition into a solid purple area on the right.

Kaleido.

Maak kennis met Kaleido...

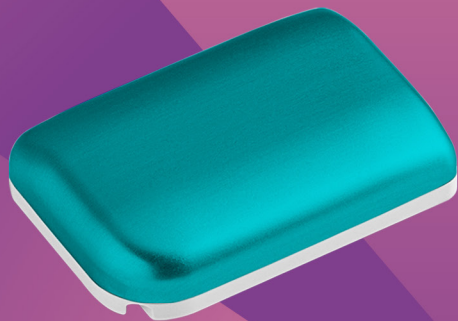

Wij zijn niet zo maar een innovatief bedrijf, wij zijn vrienden en familie van mensen met type 1 diabetes. We begrijpen dat diabetes inconsistent, inexact en bovenal individueel is. Diabetes is voor iedereen verschillend en wij vinden dat een insulinepomp zich daaraan moet kunnen aanpassen. Want wat voor de één perfect werkt, kan voor de ander niet de juiste manier zijn.

Dus daarom presenteren wij je Kaleido. Ontworpen om jou te helpen te leven op jouw voorwaarden. Hoe we dat doen? We maken het persoonlijk, houden het discreet (voor wie dat wil!) en bieden je producten die altijd eenvoudig zijn in het gebruik en makkelijk te begrijpen zijn.

Wij sluiten aan bij jouw manier van leven en ondersteunen je om de keuzes te maken die daarbij horen. Kaleido geeft je de vrijheid en flexibiliteit om te kunnen doen waar jij je goed bij voelt. Diabetes is misschien voor het leven, maar het leven bestaat uit meer dan alleen diabetes!




Hoe werkt het?

Wanneer je kiest voor Kaleido ontvang je een Starter Kit met daarin twee herbruikbare pompen, een handset en alle technische training en ondersteuning die je nodig hebt om het beste uit je Kaleido te halen. Daarnaast krijg je onze Top-up Kits op gezette tijden bij jou thuis geleverd om je van alles te voorzien om te kunnen blijven pompen. Zo stel je zelf je perfecte Kaleido samen.

...zodat jij kan leven op jouw voorwaarden

Maak het persoonlijk!


Kaleidoërs houden van lol, zijn gedreven en weten wat ze willen. En daar houden we van! Als we allemaal hetzelfde zouden zijn, zou de wereld maar saai zijn toch? Kies jouw favoriete kleurencombinatie en maak het persoonlijk!

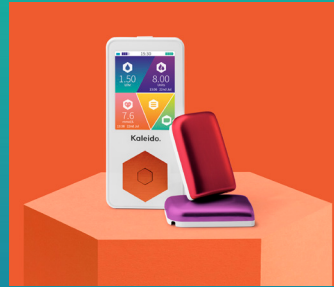


Fearless




Candy Cane

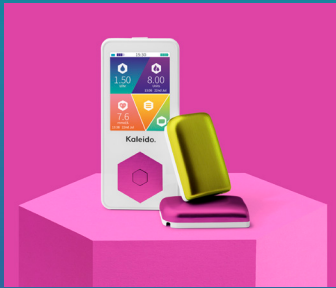


Fancy Flamingo

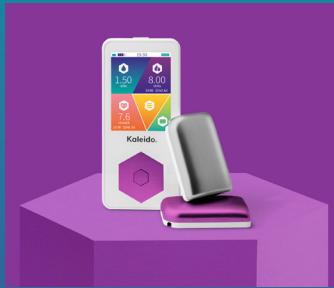


Lavender Grove

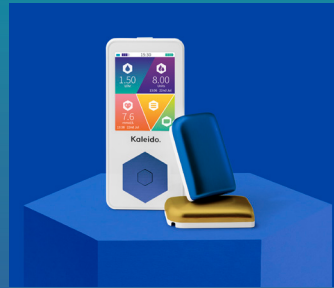


Gatsby

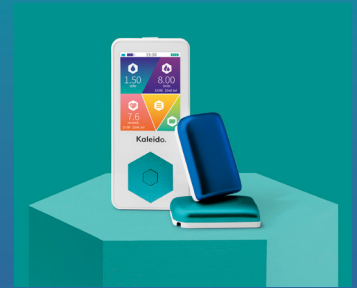


Ocean

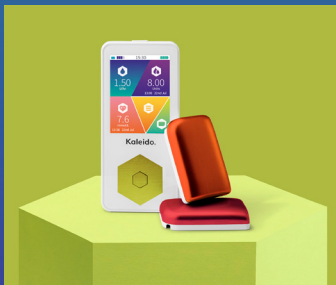

Pumpkin Spice

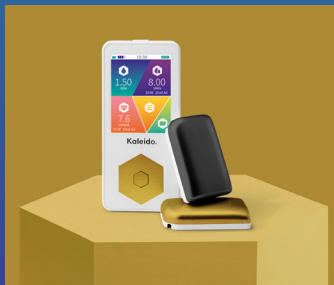

Cheetah

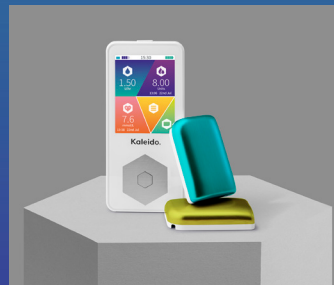

Hummingbird



Black Magic



- Draag Kaleido als een patchpomp of als een conventionele pomp, draag het zoals jij het wilt! Met onze kleine pomp, **slangetjes van 5 en 30 cm** en patches, zijn er mogelijkheden genoeg om Kaleido op jouw manier te kunnen dragen.
- Jij kiest je eigen stijl, dus waarom kies je ook niet een insulinepomp die daarbij past? We hebben **tien kleuren-combinaties** voor je; welke combinatie kies jij?
- Onze rechte, Teflon™ infusiesets zijn verkrijgbaar in twee verschillende **canulelengtes: 6 mm en 9 mm**. Samen met onze slimme inserter verloopt jouw set-wissel-dag net een beetje soepeler.
- Of je nu een CGM een FGM draagt, of je favoriete bloedglucosemeter gebruikt, je kunt snel en eenvoudig al je BG-waarden opslaan in je Kaleido handset. Het is belangrijk om de **juiste methode te kiezen om jouw bloedglucose te kunnen monitoren** en die keuze maak jij!



Kies jouw perfecte Kaleido!

Het oog wil ook wat

Wij snappen niet waarom medische hulpmiddelen er zo... medisch uit moeten zien. Kaleido is een insulinepomp waar je trots op kunt zijn!

Je kunt Kaleido aan de buitenwereld showen of je pomp onder je kleding dragen. Het is jouw diabetes en jij bepaalt hoe jij je dag (of nacht...) tegemoet gaat.





Klein en uniek in zijn soort


Onze pompen bevatten 200 eenheden insuline, toch zijn ze klein *en* licht. Je pomp en handset staan met elkaar in verbinding via Low Energy *Bluetooth®* en omdat de handset modern is vormgegeven, hoeft niemand te weten dat jij bent gekoppeld aan een insulinepomp. Kaleido is zo klein, dat je wellicht zelfs vergeet dat je het bij je draagt!

Pronk ermee of hou het discreet!

Eenvoudig te gebruiken, dragen en begrijpen

Alle beslissingen die we maken op het gebied van design, zijn gemaakt met eenvoud in ons achterhoofd.

Een insulinepomp wordt vaak gezien als complex en technisch. Kaleido wil dat graag veranderen; we helpen je minder tijd te besteden aan je pomp.

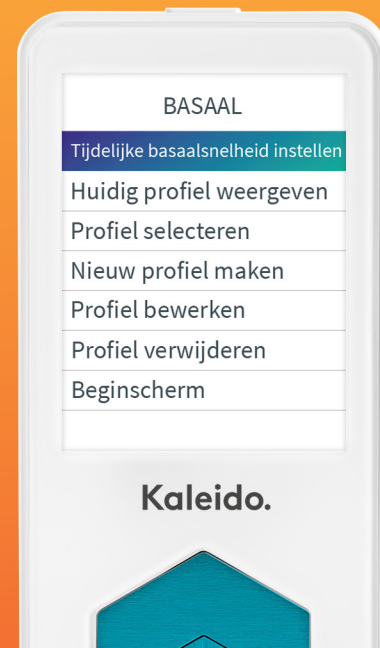

- ✓ Je krijgt een systeem wat jij je snel eigen kunt maken, een beginscherm dat je een compleet overzicht geeft, intuïtieve menu's en eenvoudige taal.
- ✓ Dankzij Kaleidoculator krijg je een goed overzicht van de berekening van je bolus. Dankzij onze makkelijke navigatie en snelle knoppen kun jij in rap tempo bolussen.
- ✓ Je hebt een nieuwe insulinecartridge zo gevuld.
- ✓ Eenvoudig je gegevens uploaden naar het Glooko+diasend®-systeem, dan hou jij het overzicht.
- ✓ Onze basaalprofielen zijn eenvoudig en snel in te stellen, te bekijken en te wijzigen.
- ✓ Eenvoudig je voorraad in de gaten houden dankzij onze super georganiseerde Top-up Kits!



Kaleido is eenvoudig in het gebruik, makkelijk te begrijpen en heb je snel onder de knie. Het voordeel? Kaleidoërs hebben een pomp die ze met plezier gebruiken en hebben de controle. *Hoera!*

Omdat het leven al ingewikkeld genoeg is

Kaleido's technische specificaties

Wil je weten wat wij allemaal kunnen? Hier vind je alle informatie voor insiders:

Het Kaleido® systeem

Afmetingen	Pomp: 50 mm x 35 mm x 12,5 mm Handset: 107 mm x 50 mm x 9 mm Opladstation: 60 mm x 45 mm x 15 mm
Gewicht	Pomp: 19 g Handset: 60 g Opladstation: 13 g
Batterijen	Pomp: 260 mAh oplaadbare lithium-polymeer Handset: 550 mAh oplaadbare lithium-polymeer
Kleuren	10 kleuren: twee voor je pomp en één voor je handset! Rood, Oranje, Groen, Turquoise, Blauw, Paars, Roze, Zwart, Goud en Zilver
Geheugen	Geheugen om je gegevens tot 90 dagen op te slaan en 8 dagen geheugen beschikbaar op de handset. Je gegevens kunnen worden geüpload naar het Glooko+diasend®-systeem
Garantie	4 jaar
IP-beschermingsgraad	Pomp: IP68 (stofdicht en waterdicht tot 1,5 m. voor 1 uur) Handset: droog houden Opladstation: droog houden

Insulinetoediening

Insulinecartridge capaciteit	Onze insulinecartridges van 200 eenheden zijn compatibel met NovoRapid® of Humalog® snelwerkende E100-insuline
Basaal	• 24-uurssegmenten in elk profiel • Minimale basaalsnelheid: 0,05 E/u - Maximale basaalsnelheid: 5 E/u - Stapjes voor het verhogen/verlagen van de basaalsnelheid: 0,05 E • Tijdelijke basaalsnelheden tot 24 uur van 0% tot 200%
Bolus	• Snelle Bolus: Minimale bolus: 0,05 E - Maximale bolus: 30 E - Stapjes voor het verhogen/verlagen van de bolus: 0,05 E • Verlengde Bolus van 0,05 tot 30 eenheden, met een minimale toediening van 0,05 als snelle bolus en de resterende eenheden verlengd over een periode van 0,5 tot 9,5 uur in stappen van een half uur
Kaleidoculator	• Werkingsduur insuline van 2 tot 8 uur met stapjes van 0,5 uur • Koolhydraatratio per uur in te stellen • Insulinegevoeligheid per uur in te stellen • Insulin on Board (IOB) met een lineaire berekening over alle bolussen

Veiligheid

Waarschuwingen	Pomp of handsetbatterij is bijna leeg, insulinecartridge is bijna leeg, insuline cartridge verloopt bijna, systeemwaarschuwing
Alarmen	Pomp of handsetbatterij is leeg, insulinecartridge is leeg, insulinecartridge is verlopen, verstoppingsalarm, systeemalarm
Vergrendelscherm	Stel een code in, die juist moet worden ingevoerd om de handset te kunnen ontgrendelen
Medische Melding	Sla belangrijke contactgegevens op in je handset die anderen kunnen zien in een noodsituatie

Wil je nog meer weten? Leuk!

Neem contact met ons op:

Email: Kaleidocare.nl@hellokaleido.com
Telefoonnummer: +31 (0) 800 19 10
website: hellokaleido.nl



Verklaring

Kaleido is ontworpen voor de continue en subcutane toediening van insuline voor de behandeling van insulineafhankelijke diabetes mellitus. De pomp geeft insuline af op basis van geprogrammeerde basaalprofielen en bolussen, door middel van een subcutane infusieset op vaste en wisselende snelheden.

Kaleido®, Kaleido Care® and ViCentra® zijn geregistreerd handelsmerken van ViCentra BV.

Bluetooth® naam en logo zijn een geregistreerd handelsmerk, eigendom van Bluetooth SIG, Inc en gebruik van deze merknamen door ViCentra BV is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren.

Glooko® en diasend® zijn geregistreerde handelsmerken van Glooko.

Humalog® is een geregistreerd handelsmerk van Eli Lilly and Company.

NovoRapid® is een geregistreerd handelsmerk van Novo Nordisk A/S.

Facebook en het Facebook logo zijn geregistreerde handelsmerken van Facebook Inc.

TWITTER, TWEET, RETWEET en het Twitter logo zijn geregistreerde handelsmerken van Twitter, Inc. en haar gelieerde ondernemingen.

Instagram en de Instagram Glyph zijn geregistreerde handelsmerken van Instagram LLC.

YouTube en het YouTube logo zijn geregistreerde handelsmerken van Google LLC.



Kaleido.®